

Gebrauchsanweisung Ref. SF2-A555

Medizinprodukt der Klasse I, sterilisierbare Applikatorspitze aus Edelstahl für steriles OsteoBiol® Putty® Knochenkitt in einer Spritze. Die Applikatorspitze dient der leichteren Applikation von OsteoBiol® Putty bei schwer zugänglichen Knochendefekten im hinteren Kieferbereich. Vor der Sterilisation muss die Spitze innen und außen vollständig sauber sein.

Sterilisieren Sie die Spitze im Autoklaven bei 134 °C. Nach dem Öffnen der OsteoBiol® Putty-Spritze (Codes HPT09S, HPT35S, HPT32S) setzen Sie die sterile Edelstahlspritze mithilfe steriler Handschuhe vollständig auf die Spritzenspitze und achten Sie auf einen sicheren Sitz. Betätigen Sie den Kolben der OsteoBiol® Putty-Spritze und drücken Sie das Biomaterial in die Edelstahlspritze. Stellen Sie sicher, dass es während der chirurgischen Applikation korrekt austritt.

Nach Gebrauch die Edelstahlspritze aus der Einwegspritze OsteoBiol® Putty entnehmen, die Innenseite der Edelstahlspritze mit einer Einwegbürste gründlich reinigen, um sicherzustellen, dass keine Biomaterialreste zurückbleiben, und das Standardprotokoll für die postoperative Reinigung und Desinfektion chirurgischer Instrumente (Ultraschallbad mit Tensid) befolgen.

Abschließend die Edelstahlspritze vor dem nächsten Eingriff im Autoklaven bei 134 °C sterilisieren und in einem sterilen Beutel aufbewahren. Dieses Produkt ist spezialisierten Chirurgen mit fundierter klinischer Erfahrung in der Anwendung von Biomaterialtransplantaten vorbehalten. Der spezialisierte Chirurg ist für die korrekte Handhabung und Desinfektion der Spitze bei jeder Anwendung verantwortlich.

OsteoBiol® Putty ist ein Medizinprodukt der Firma TecnoSS® s.r.l., Piazza Papa Giovanni XXIII, 2 – 10094 Giaveno (TO), Italien.

OsteoBiol® und TecnoSS® sind eingetragene Warenzeichen der Firma TecnoSS® s.r.l.

Hersteller: R.O.E.N. s.a.s. – Via Torino 23 – 10044 Pianezza (TO) – www.roen.it