

ALL-BOND UNIVERSAL[®]

Lichthärtendes Adhäsiv-System

 **AMERICAN**
Dental Systems
INNOVATIVE DENTALPRODUKTE

Für Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch

DAS einzige universelle lichthärtende
Einflaschen-Adhäsivsystem

Dank hohem pH-Wert (3,5) für alle dualhärtende
Materialien geeignet – ohne den Einsatz von Aktivatoren

Geringste Filmstärke aller Adhäsivsysteme (< 10 µm)

Enthält MDP & BPDM

Das ideale Adhäsiv für die selektive Ätztechnik
bei direkten und indirekten Versorgungen

Mit Self-Etch-Technik beste Verbundwerte auf Dentin



7940200

ALL-BOND UNIVERSAL[®]

Lichthärtendes Adhäsiv-System

Direkte und indirekte Zahnpräparation

- 

Self-Etching-Technik (Technik A): Präparation gründlich reinigen. Die Oberfläche mit Wattepellet 1-2 Sekunden trocknen, nicht austrocknen!
- 

Total-Etching-Technik (Technik B): Präparation gründlich reinigen. Dentin und Schmelz für 15 Sekunden ätzen, dann absprühen. Die Oberfläche mit Wattepellet 1-2 Sekunden trocknen, nicht austrocknen!
- 

Selective-Etching-Technik (Technik C): Präparation gründlich reinigen. Präparierten und unpräparierten Schmelz für 15 Sekunden ätzen, dann absprühen. Die Oberfläche mit Wattepellet 1-2 Sekunden trocknen, nicht austrocknen!
- 

Zwei separate Schichten All-Bond Universal[®] auftragen und jede Schicht mit einer Mikrobürste gut in die Kavität einmassieren. Zwischen dem Auftragen der Schichten nicht lichthärten.
- 

Überschüssiges Lösungsmittel mit Luftbläser mindestens 10 Sekunden verpusten, so dass keine Flüssigkeitspfützen verbleiben. Die Oberfläche sollte glänzen, ansonsten die Schritte 2 und 3 wiederholen. Für 10 Sekunden lichthärten.
- 

Mit dem Einbringen des Restaurationsmaterials gemäß den Anweisungen des Herstellers fortfahren.