

# THERAPIE STEP-BY-STEP

## Adhäsive Befestigung von Vollkeramikveneers

**AMERICAN**  
Dental Systems  
INNOVATIVE DENTALPRODUKTE

All-Bond Universal® – Lichthärtendes Universal-Adhäsiv

Porcelain Primer – Silan-Primer

Porcelain Bonding Resin (HEMA- und Füllstoff-frei)

ZirClean™ – Reinigungsgel

Chioce™ 2 – Lichthärtender Komposit-Zement und Try-In-Pasten

Etch-37™ – Gelartiges Phosphorsäure-Ätzmittel



# THERAPIE STEP-BY-STEP

## Adhäsive Befestigung von Vollkeramikveneers


*Diese Technik wird verwendet für Lithium-Disilikate, Glas- und Feldspath-Keramik.*




**Schritt 1:** Falls vom Labor nicht vorbereitet, das Veneer mit Flusssäure-Ätzel (Porcelain Etchant 4 % oder 9,5 %) ätzen – entsprechend der Anweisung des Herstellers. Bei anschließender Verwendung von Try-In-Pasten nicht direkt silanisieren. Die provisorische Restauration entfernen und die Präparation reinigen. Gründlich spülen.




**Schritt 2:** Die Restauration unter Verwendung des entsprechenden Farbtönen einer wasserlöslichen Try-In-Paste (Choice™ 2 Try-In Paste) einprobieren. Veneer abnehmen, Oberfläche mit H<sub>2</sub>O reinigen, mit ölfreier Luft verpusten und anschließend ZirClean™ für 20 Sekunden auftragen, erneut mit H<sub>2</sub>O abspülen und verpusten.

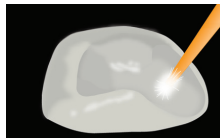

**Schritt 3:** Eine dünne Silanschicht (Porcelain Primer) auf die innere Oberfläche des Veneers auftragen. 30 Sekunden warten und mit warmer Luft trocknen. NICHT lichthärten!

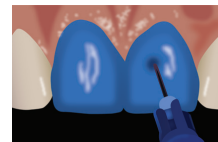

**Schritt 4:** Die Zahnpräparation für 15 Sekunden mit Etch-37™ ätzen, anschließend gründlich spülen.

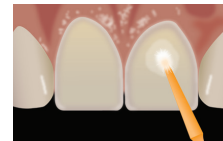

**Schritt 5:** Zwei Schichten All-Bond Universal® applizieren, jede Schicht für 10-15 Sekunden mit Einwegbürstchen einmassieren und einwirken lassen. Die Oberfläche der Kavität vorsichtig luft-trocknen, so dass keine Pfützen verbleiben. Die Oberfläche sollte glänzen, ansonsten Schritt 5 wiederholen. Für 10 Sekunden lichthärten.



**Optional** kann zur Verringerung der Viskosität des Veneer-Zementes Choice™ 2 eine dünne Schicht Porcelain Bonding Resin (HEMA- und Füllstoff-frei) aufgetragen werden, nicht lichthärten!

**Schritt 6:** Die innere Oberfläche des Veneers mit Choice™ 2 (lichthärtender Komposit-Zement) dünn beschichten. Das Veneer mit sanftem, passivem Druck platzieren und für 1-2 Sekunden lichthärten, um es zu fixieren. Überschüssigen Zement entfernen, dann jedes Veneer von allen Seiten für 40 Sekunden lichthärten.